

OMRON

Manžeta Comfort


Návod k obsluze manžety OMRON Comfort

Děkujeme, že jste si zakoupili manžetu Omron Comfort.

Obvod paže pro tuto manžetu je 22 až 42 centimetrů. Tuto manžetu lze použít s následujícími přístroji: OMRON M7, M6 Comfort, M8 Comfort* a 773.

*M8 Comfort není určen pro prodej v České republice

Obsah balení

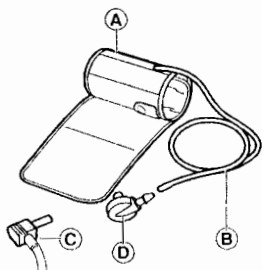

A. CP manžeta na paži

B. Vzduchová hadička

C. Vzduchová zástrčka pro
OMRON M7, M8 Comfort* a 773)

D. Vzduchová zástrčka pro
OMRON M6 Comfort


Návod k obsluze:

Poznámka: pro správnou funkci přístroje připojte na konec vzduch. hadičky správný typ vzduchové zástrčky (viz. obsah balení bod C nebo D).


Upevnění manžety na paži

Manžetu můžete ovinout buď kolem pravé, nebo kolem levé paže.

- Svlékněte si z paže těsně přiléhající oděv.
- Neupevňujte manžetu přes tlusté oděvy a nevyhrnujte si rukáv, je-li příliš těsný.


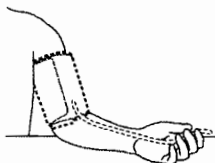


1. Zasuňte vzduchovou zástrčku do vzduchového konektoru (na levé straně přístroje).

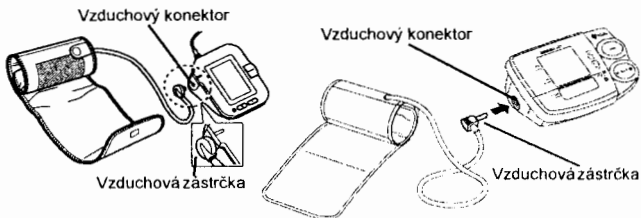


Při zasouvání do vzduchového konektoru musí být manžeta zcela vyfouknutá.

2. Posadte se na židli s chodidly rovně na podlaze a položte ruku na stůl tak, aby manžeta byla ve stejné úrovni jako vaše srdce.

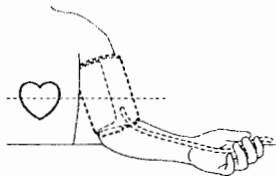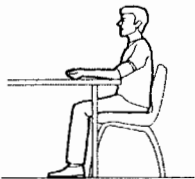


3. Poutko manžety uchopte pevně rukou.

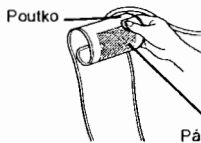

4. Otočte vaši ruku dlaní vzhůru.




5. Otočte vaši ruku dlaní vzhůru.

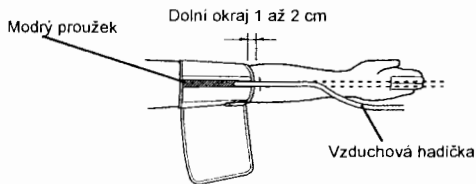

Umístěte manžetu na paži tak, aby byl modrý proužek vystředěn na vnitřní části paže a odtud směřoval dolů. Vzduchová hadička by měla vést po vnitřní straně předlokti směrem do dlaně, rovnoběžně s prostředníčkem. Dolní část manžety by se měla nacházet přibližně 1 až 2 cm nad loketním ohybem.

6. Poté, co je manžeta správně umístěna, **PEVNĚ** utáhněte pásek se suchým zipem.

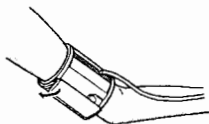


Poznámky:

- Ujistěte se, že manžeta těsně obepíná vaši paži.
- Manžeta by měla mít dobrý kontakt s pokožkou. Měla by být upevněna tak, abyste mezi manžetu a svou paži mohli vložit ukazováček a aby bylo možno s manžetou posouvat nahoru a dolů.
- Ujistěte se, že na vzduchové hadičce nejsou žádné smyčky.

Měření na pravé paži

Při upevňování manžety na pravou paži mějte na paměti následující zásady. Upevněte manžetu tak, aby vzduchová hadička vedla kolem loktu na straně malíčku.

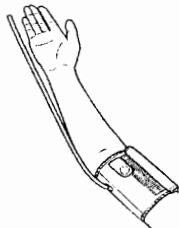

Poznámky:

- Dávejte pozor, abyste paži nepoložili na vzduchovou hadičku. Omezil by se tím průtok vzduchu.
- Upevněte manžetu na paži tak, aby žádná její část nepřesahovala přes loketní kloub. Manžeta musí být 1 až 2 cm nad loktem.
- Při použití dvakrát denně vydrží manžeta 3 roky.

Údržba



Skvrny na manžetě je možné opatrně odstranit pomocí navlhčeného hadříku a mýdlové vody.

Manžetu nikdy neperte ani ji nenamáčejte!

Nestáčejte manžetu ani vzduchovou hadičku příliš pevně a nemačkejte je

CE

Tato manžeta splňuje požadavky evropské směrnice 93/42/EEC (Směrnice pro lékařské přístroje).

Pobočka	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive Fox Milne, Milton Keynes MK 15 0DG, Velká Británie
Pobočka	OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft m.b.H. Windeckstraße 81a, D-68163 Mannheim, Německo www.omron-medizintechnik.de
Pobočka	OMRON SANTÉ FRANCE 14, rue de Lisbonne, F-93561 Rosny-sous-Bois Cedex, Francie
Výrobce	OMRON HEALTHCARE CO., LTD. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084 Japonsko 
Zástupce pro Evropskou unii	OMRON HEALTHCARE EUROPE BV Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp, Nizozemi www.omron-healthcare.com 
Distribuce a servis pro ČR	CELMED s.r.o Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 212 038 www.celimed.cz

IM-ManžetaComfort-01-07/06.